

## ThevoautoActiv

## ThevoautoActiv

## ThevoautoActiv

- Liggen zonder zorgen
- Micro-bewegingen bevorderen het herstel!
- Beweging is meer dan alleen het veranderen van druk!



- MiS Micro-Stimulatie® prikkelt voortdurend het lichaam
- Prikkeling bevordert het waarnemingsvermogen
- Een verbeterde waarneming activeert en stimuleert het herstel

ThevoautoActiv met MiS Micro-Stimulatie® voorkomt en behandelt onder andere decubitus.



De unieke combinatie van het onderleg systeem met het daarbij behorende matras zorgt voor de MiS Micro-Stimulatie®.

- Verbeterd de zintuiglijke waarnemingen
- Verbeterd de regulering van de spierspanning
- Vermindert spasmen
- Is een hulpmiddel bij pijnbestrijding
- Versnelt de inslaaptijd
- Bevordert doorslapen
- Bevordert een natuurlijk slaapritme
- Voorkomt en behandelt decubitus

Prikkelingen door onbewust bewegen zorgen voor herstel en rust

Thevoautoactiv, uw bewegende ondersteuning

Bruikbaar op praktisch alle bestaande bedbodems

## Thevo-Activ


## Thevo-Activ

## Thevo-Activ

De ThevoActiv is gelijk aan de ThevoautoActiv, met dit verschil dat de ThevoActiv wordt aangestuurd en de micro-stimulatie wordt opgewekt. Op de bedieningsunit kunnen verschillende bewegingspatronen worden ingesteld.



- Geschikt voor patiënten met een hoog risico
- Voor decubitus tot en met graad IV
- Voor pijntherapie
- Micro-stimulatie door middel van verschillende bewegingspatronen

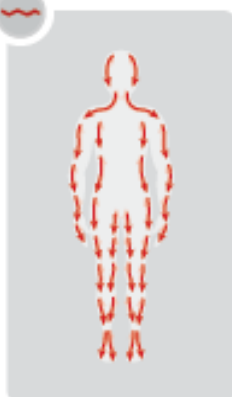


### Golf

De actoren worden parallel aan de linker -en rechterkant aangestuurd. Het stimulatiepatroon gaat als een golf door het bed. De patiënt voelt dit van hoofd tot voet.



### Rotatie

De actoren worden gespreid over de linker -en rechterkant aangestuurd. Dit resulteert in een roterend patroon. De richting van de rotatie keert na drie runs om.

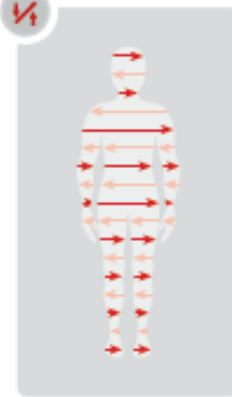


### Schommeling

Alle actoren worden tegelijkertijd aan één kant aangestuurd. Na een vooraf ingestelde tijd wordt de beweging van de andere kant ingestart.




### Statisch

In deze stand wordt er geen bewegingspatroon uitgevoerd. In gereguleerde intervallen worden alle actoren tegelijk omhoog gebracht.

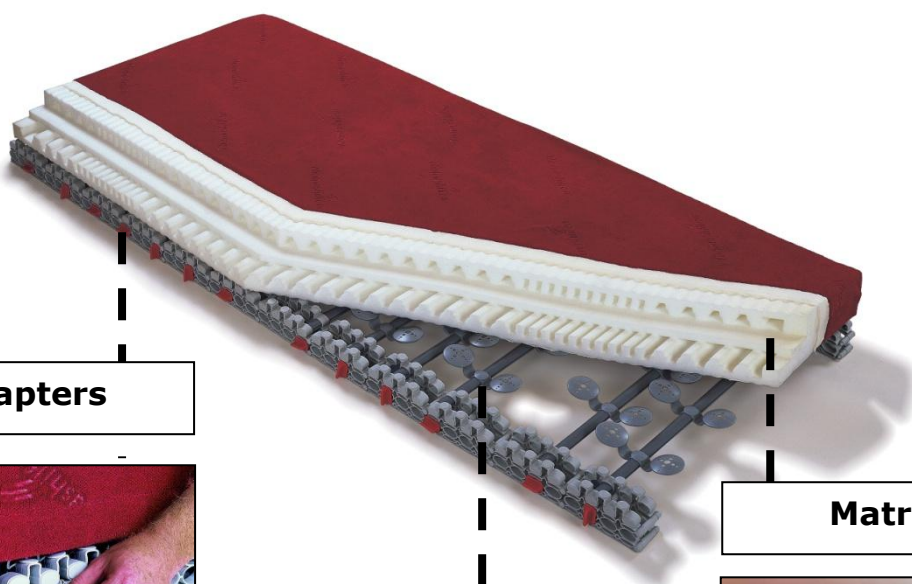

### Adapters

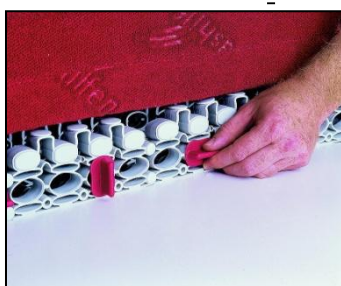

De zijelementen van het onderleg systeem zijn flexibel. Met behulp van de adapters kan het onderleg systeem zo ingesteld worden dat hiermee een optimale gelijkmatige lichaamsondersteuning en drukverdeling bereikt kan worden.

### Vleugels




De vleugels zorgen voor het micro-stimulatie effect, wat de slaap op positieve wijze beïnvloedt.

### Matras



Het bijbehorende matras is op een speciale manier uitgesneden en samen met de open celstructuur van het polyurethaan koudschuim zorgt dit voor een optimale ventilatie voor de huid. Vocht en warmte worden met dit systeem optimaal gereguleerd.

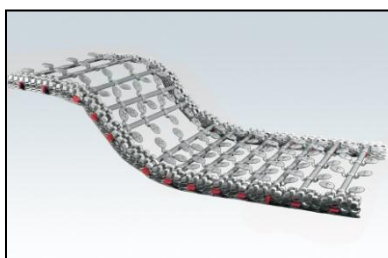

Met dit systeem kunt u alle verstelmogelijkheden van het bed, zoals hoofd -en beenverstellingen, blijven gebruiken.

### Het Thevo MiS® systeem:

- Zorgt voor drukverlaging
- Bevordert een natuurlijk slaapritme
- Verlicht pijnklachten
- Vermindert stram -en stijfheid
- Verbeterd een slechte bloedsomloop